

商品情報	品名	非接触型検温ディスプレイ	
	品番	MKKS-440	

製品仕様	測定誤差	・・・ $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	電池	・・・ 単2乾電池4本（別途）
	使用環境	・・・ $15^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$	材質	・・・ ABS樹脂
	測定時間	・・・ 約0,5秒	質量	・・・ 700g
	測定距離	・・・ 2cm～8cm	寸法	・・・ W146×H440×D140mm
	温度単位	・・・ 摂氏/華氏	タンク容量	・・・ 1200ml

使用方法	●温度センサーに手をかざすとディスプレイに温度値が表示されます： 正常温度の場合はピープ音が鳴り、警告ライトが緑色に点滅します。 異常温度の場合、アラームが鳴り、警告ライトが赤色に点滅します。		
	●手元ライトが点灯し除菌用アルコールが噴霧されます。		

使用上の注意	●本来の用途以外は使用しないでください。 手以外の場所には使用しないで下さい。		
	●液体アルコール剤専用です。 ジェルタイプ・泡タイプは使用しないで下さい。		
	●使用不可の場所 湿気の多い場所・雨や水のかかる場所・火気の近く・ ・ほこりや金属粉が多い場所・小さなお子様の手が届く場所 ・直射日光の当たる場所・振動、衝撃のある場所		
	●指定された乾電池以外は使用なさないでください。 乾電池を使い切った場合や長時間使用しない場合は本機から 取り外してください。電池交換の場合は新旧の乾電池・異なる タイプの乾電池を混ぜないでください。。		
	●本機が汚れた場合は水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、 よく絞ってから拭き取ってください。 アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用不可		
	※本製品は、表面温度を検知して、体温の高い可能性のある方を発見する 為の装置であり、体温を測定して対象者が疾病に罹患しているかどうか を診断する器具ではありません。体温が高い可能性のある方を検知した 場合は、必要に応じて体温計での体温測定や医師による診断を行って 下さい。		